

IDEXX VetLab Station

간편 사용자 가이드

IDEXX VetLab* Station 사용에 대한 자세한 내용(예: 검사 실행에 검사 추가, 결과 재할당, SNAP* 검사 결과 입력)을 확인하려면 idexx.com/product-info 및/또는 learn.idexx.com을 방문하세요.



메인 화면 탐색

분석기기 상태 아이콘

색상으로 구분된 아이콘으로 어떠한 분석기기가 검사를 실행하고 있는지, 혹은 이용 가능한 상태인지 파악합니다.

- 초록색 (준비완료)—연결되어 통신 중
- 노란색 (바쁜/대기)—사용 중 또는 대기 모드
- 그레이 (오프라인)—연결이 끊어짐
- 빨간색 (경고)—문제 발생— 자세한 정보를 보려면 아이콘을 누릅니다.

검사 대기 중 목록 또는 환자 목록

진료 관리 시스템(PIMS)이 있는 경우, 검사 대기 중 목록 및/또는 환자 목록을 포함하도록 홈 화면 설정을 수정할 수 있습니다. 활성화되면 드롭다운 화살표를 사용하여 다음 중에서 표시하고 싶은 목록을 선택하세요.

- 검사 대기 중 목록 - 진료 관리 시스템(PIMS)에서 요청한 환자 목록을 확인할 수 있습니다. 환자 이름을 탭하여 검사를 실행합니다. 삭제 아이콘 을 이용하여 검사 대기 중 목록에서 선택한 환자를 삭제할 수 있습니다.
- 환자 목록 - 진료 관리 시스템(PIMS)을 통한 병원에 등록된 환자 목록을 확인할 수 있습니다. 환자 이름을 탭하여 검사를 실행합니다.

메시지 센터

IDEXX의 알림을 보려면 아이콘을 누릅니다.

IDEXX SmartService 지표

점 색상은 IDEXX SmartService* Solutions 연결 상태를 나타냅니다.

- 초록색—연결됨
- 노란색—연결 중
- 회색—비활성화
- 빨간색—오프라인

기어 아이콘

분석기기별 화면에 액세스하거나, 설정을 맞춤화하거나, 도움을 받거나, 메시지를 확인하거나 시스템 전원을 끌 수 있는 메뉴를 열려면 아이콘을 누릅니다.

모든 결과 보기 아이콘


을 눌러 각 환자의 과거 모든 원래 진단 결과를 볼 수 있습니다.

기록 검색 버튼

특정 환자의 기록을 검색합니다.

결과 목록

지난 7일 이내에 생성된 환자의 검사 결과 목록을 확인합니다. 환자를 선택하여 검사 결과를 확인하거나 인쇄할 수 있습니다.

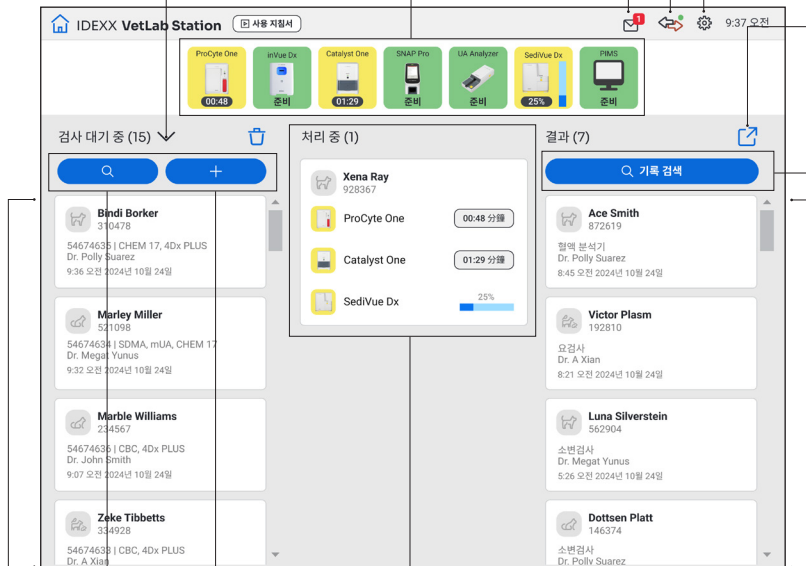

검색 버튼

을 선택하여 검사 대기 중 목록 또는 환자 목록에서 특정 환자를 검색하고 검사를 실행합니다.


검사 추가/분석 버튼

환자 정보를 수동으로 입력하고 검사를 실행합니다.



진행 중 목록

현재 실행 중인 검사, 대기 중인 검사 또는 조치가 필요한 검사를 확인합니다.

통합 진료 관리 시스템(PIMS)을 사용하여 검사 실행

- 홈 화면의 **검사 대기 중** 또는 **환자목록**에서 원하는 환자를 누르거나 를 눌러 **검사 대기 중** 또는 **환자 목록**에서 환자를 검색합니다.
- 원하는 기기를 선택하고 **검사 실행**을 누릅니다.

IDEXX VetLab Station에서 직접 검사 실행 시작

- 홈 화면에서  또는 을 누릅니다.
- 환자 정보 선택/입력:
 - + **새 환자인 경우** - 새 환자 추가를 누르고 환자/고객 정보를 입력한 뒤 **다음**을 누릅니다. 그런 다음, 환자/진료 정보를 확인/명시하고, 원하는 분석기기를 선택한 후 **검사 실행**을 누릅니다.
 - + **기존 환자인 경우** - 환자 이름, 성 또는 고객 ID 란에 정보를 입력합니다. 목록에서 원하는 환자를 선택한 후, **다음**을 누릅니다. 그런 다음, 환자/진료 정보를 확인/명시하고, 원하는 분석기기를 선택한 후 **검사 실행**을 누릅니다.
 - + **응급 환자인 경우** - 긴급을 누릅니다. 동물종과 연령층을 선택합니다. 시스템은 환자를 식별하기 위해 고유한 타임스탬프를 자동으로 입력합니다(나중에 검사 결과를 재할당할 때 사용할 수 있음). **다음**을 누릅니다.
- 원하는 분석기기를 선택하고 **실행**을 누릅니다.

수동 SNAP 검사 결과 입력/편집

수동 SNAP 검사 결과 입력:

- 진행 중 목록에서 **SNAP** 아이콘을 누르거나 SNAP 타이머 완료 대화 상자에서 **결과 입력**을 누릅니다.
- SNAP 검사 결과 창과 일치하는 이미지를 누릅니다.
- (선택사항) **설명**을 누른 다음 사용자 ID와 이 검사 결과에 대한 설명을 입력합니다.
- 저장**을 누릅니다.

SNAP 검사 결과 편집:

- 결과 화면에서 **결과 관리**를 누릅니다.
- 수동 결과 편집**을 누른 다음 편집할 SNAP 검사 결과를 선택합니다.
- 변경한 후 **저장**을 누릅니다.

수동으로 물리적 및 화학적 요분석 속성 입력




검사 실행 중 요 검체의 화학적, 물리적 특성 추가:

- 요분석 검사 실행을 시작합니다.
- 원하는 기기 아이콘을 선택하라는 메시지가 표시되면 **수동 UA** 아이콘을 누른 다음 검체의 수집 방법, 색상 및 투명도를 선택합니다.
- 검체의 비중을 입력합니다.
- 검체 pH와 일치하는 색상을 누릅니다.
- 모든 화학 반응이 정상인 경우 **모두 음성/정상**으로 설정을 누릅니다. 그렇지 않은 경우 적절한 결과를 지정합니다. (일부 결과만 변경하는 경우 완료되면 **다음**을 누릅니다.)
- 설명을 입력하고 **완료**를 누릅니다.

수동 UA 속성 편집:


- 결과 화면에서 **결과 관리**를 누릅니다.
- 수동 결과 편집**을 누른 다음 편집할 수동 UA 결과를 선택합니다.
- 변경한 후 **저장**을 누릅니다.

결과 보기 및 인쇄


- 다음 중 하나를 수행합니다:
 - + 검사 완료 후 즉시 결과를 보려면 새로운 결과 알림 메시지를 누릅니다.
 - + 최근 7일간 진행된 결과를 보려면 홈 화면의 결과 목록에서 환자 이름을 누릅니다.
 - + 과거 결과 기록 보기:
 - 홈 화면의 결과 목록에서 **기록 검색**을 누르거나 을 누르고, 원하는 환자를 검색하여 선택한 후 **보기**를 누릅니다.
 - 홈 화면이 아닌 경우, 을 누르고, 원하는 환자를 검색하여 선택한 다음 **보기**를 누릅니다.
- 원하는 결과가 포함된 항목을 누릅니다.
- 선택한 항목에서 모든 검사 결과가 종합된 보고서를 인쇄하려면  아이콘을 누릅니다.

매주 유지관리

IDEXX는 매주 시스템을 다시 시작할 것을 권장합니다.

-  아이콘을 누른 다음, **전원 끄기**를 누릅니다.
- 전원 끄기** 또는 **다시 시작**을 누릅니다.

설정 맞춤화

진료 니즈에 맞게 IDEXX VetLab Station을 맞춤화할 수 있습니다. 을 누른 다음 **설정**을 누릅니다.