

IDEXX VetLab Station

간편 사용자 가이드

IDEXX VetLab* Station 사용에 대한 자세한 내용(예: 검사 실행에 검사 추가, 결과 재할당, SNAP* 검사 결과 입력)을 확인하려면 idexx.com/product-info 및/또는 learn.idexx.com 을 방문하세요.



메인 화면 탐색

분석기기 상태 아이콘

색상으로 구분된 아이콘으로 어떠한 분석기기가 검사를 실행하고 있는지, 혹은 이용 가능한 상태인지 파악합니다.

- 초록색 (준비완료)—연결되어 통신 중
- 노란색 (바쁜/대기)—사용 중 또는 대기 모드
- 그레이 (오프라인)—연결이 끊어짐
- 빨간색 (경고)—문제 발생—자세한 정보를 보려면 아이콘을 누릅니다.

메시지 센터

IDEXX의 알림을 보려면 아이콘을 누릅니다.

IDEXX SmartService 지표

점 색상은 IDEXX SmartService* Solutions 연결 상태를 나타냅니다.

- 초록색—연결됨
- 노란색—연결 중
- 회색—비활성화
- 빨간색—오프라인

기어 아이콘


분석기기별 화면에 액세스하거나, 설정을 맞춤화하거나, 도움을 받거나, 메시지를 확인하거나 시스템 전원을 끌 수 있는 메뉴를 열려면 아이콘을 누릅니다.

줄임표 (...)

환자 목록을 표시하거나 검사 대기 중 목록에서 요청을 제거하는 옵션을 보려면 “...” 를 클릭합니다.

검사 대기 중 목록

통합된 진료 정보 관리 시스템(PIMS)에서 어떤 환자에 미결 요청이 있는지 확인합니다.

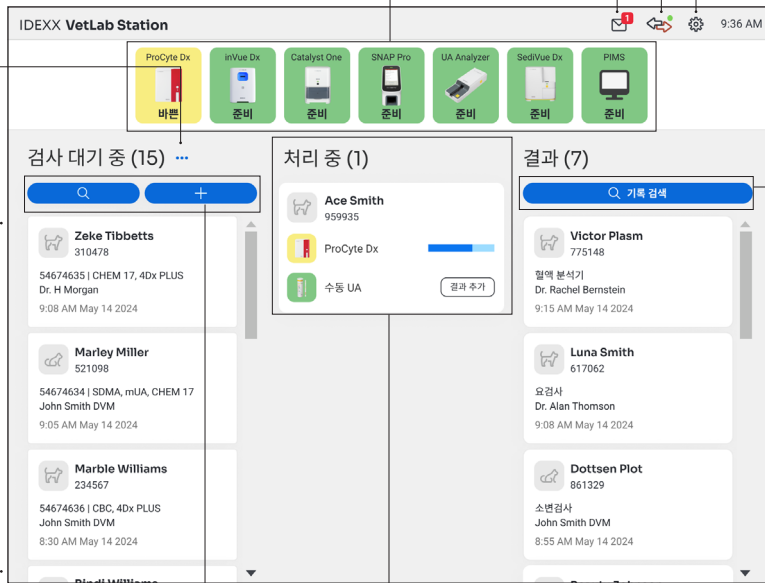

기록 검색

환자 기록을 검색합니다.

결과

지난 7일 이내에 생성된 원내 환자의 결과 목록을 확인합니다. 환자를 선택하고 결과를 보거나 인쇄하려면 누릅니다.


검색 및 추가 버튼

검사 대기 중 목록에서 환자를 검색하려면 **검색**을 누릅니다. 환자 정보를 수동으로 입력하려면 **추가**를 누릅니다.

진행 중 영역

현재 실행 중인 검사, 실행 대기 중인 검사 또는 조치가 필요한 검사를 확인합니다.

통합 PIMS를 사용하여 검사 실행 시작

1. 메인 화면의 **검사 대기 중** 또는 **환자 목록**에서 원하는 환자를 누르거나 를 눌러 **검사 대기 중** 목록에서 환자를 검색합니다.
2. 원하는 기기를 선택하고 **검사 실행**을 누릅니다.

IDEXX VetLab Station에서 직접 검사 실행 시작

메인 화면에서 를 누른 후 다음을 수행합니다.

새로운 환자인 경우:

1. **새로운 환자 추가**를 누르고 환자/고객 정보를 입력한 후, 다음을 누릅니다.
2. 환자/진료 정보를 확인/명시하고, 원하는 기기 아이콘을 선택한 후 **검사 실행**을 누릅니다.

기존 환자인 경우:

1. **환자, 성, 또는 고객 ID** 상자를 눌러 해당 정보 입력을 시작합니다. 목록에서 원하는 환자를 눌러 선택한 후, 다음을 누릅니다.
2. 환자/진료 정보를 확인/명시하고, 원하는 기기 아이콘을 선택한 후 **검사 실행**을 누릅니다.

응급 환자인 경우:

1. **긴급**을 누릅니다.
2. **동물종과 연령층**을 선택합니다. 시스템은 환자를 식별하기 위해 고유한 타임스탬프를 자동으로 입력합니다(나중에 검사 결과를 재할당할 때 사용할 수 있음).
3. **다음**을 누릅니다.
4. 원하는 기기를 선택하고 **검사 실행**을 누릅니다.

수동 SNAP 검사 결과 입력/편집

수동 SNAP 검사 결과를 입력하려면:

1. 진행 중 영역에서 **SNAP** 아이콘을 누르거나 SNAP 타이머 완료 대화 상자에서 **결과 입력**을 누릅니다.
2. SNAP 검사 결과 창과 일치하는 이미지를 누릅니다.
3. (선택사항) **설명**을 누른 다음 사용자 ID와 이 검사 결과에 대한 설명을 입력합니다.
4. **저장**을 누릅니다.

SNAP 검사 결과를 편집하려면:

1. 결과 화면에서 **결과 관리**를 누릅니다.
2. **수동 결과 편집**을 누른 다음 편집할 SNAP 검사 결과를 선택합니다.
3. 변경한 후 **저장**을 누릅니다.

수동으로 물리적 요분석 속성 및 화학적 요분석 속성 입력



검사 실행 중에 소변의 화학적, 물리적 특성을 추가하려면:

1. 요분석 검사 실행을 시작합니다.
2. 원하는 기기 아이콘을 선택하라는 메시지가 표시되면 **수동 UA** 아이콘을 누른 다음 검체의 수집 방법, 색상 및 투명도를 선택합니다.
3. 검체의 비중을 입력합니다.
4. 검체 pH와 일치하는 색상을 누릅니다.
5. 모든 화학 반응이 정상인 경우 **모두 음성/정상**으로 설정을 누릅니다. 그렇지 않은 경우 적절한 결과를 지정합니다. (일부 결과만 변경하는 경우 완료되면 **다음**을 누릅니다.)
6. 설명을 입력하고 **완료**를 누릅니다.

수동 UA 속성을 편집하려면:


1. 결과 화면에서 **결과 관리**를 누릅니다.
2. **수동 결과 편집**을 누른 다음 편집할 수동 UA 결과를 선택합니다.
3. 변경한 후 **저장**을 누릅니다.

결과 보기 및 인쇄

1. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 메인 화면의 결과 목록에서 환자를 누릅니다.
 - 새로운 결과 알림 메시지를 누릅니다.
 - 메인 화면의 결과에서 를 누르고 원하는 환자를 검색하여 선택한 다음 **보기**를 누릅니다.
2. 원하는 결과가 포함된 항목을 누릅니다.
3. 선택한 항목에서 모든 검사 결과가 종합된 보고서를 인쇄하려면  아이콘을 누릅니다.

매주 유지관리

IDEXX는 매주 시스템을 다시 시작할 것을 권장합니다.

1.  아이콘을 누른 다음, **전원 끄기**를 누릅니다.
2. **전원 끄기** 또는 **다시 시작**을 누릅니다.

설정 맞춤화

진료 니즈에 맞게 IDEXX VetLab Station을 맞춤화할 수 있습니다.  아이콘을 누른 다음 **설정**을 누릅니다.